


INHOUD - Act Fast Anti-verstikkingstrainer

Uw kit moet het volgende bevatten:

1. De gepatenteerde Act+Fast Anti Choking Trainer.
2. Een interne luchtblaas.
3. Transparante plastic luchtweg. (Deze moet precies passen in de koppeling op de luchtblaas).
4. schuimpluggen voor gevorderde studenten en voor beginners.
5. Als u het Red Back Slap Pad-model hebt, bevat deze zowel een kunststof plaat als een schuimrubberen pad.
6. Gebruiksaanwijzing, raadpleeg deze voor gedetailleerde instructies.
7. Draagtas met trekkoord van nylon.

Voor wat betreft de schuimpluggen: De pluggen kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw leerling.

- Om ze gemakkelijker te kunnen uitschieten, kunt u de pluggen tussen uw vingers rollen om ze zachter te maken, of ze een klein beetje inkorten.
- Om het gebruik ervan lastiger te maken, kunt u er een klein stukje plakband omheen wikkelen.

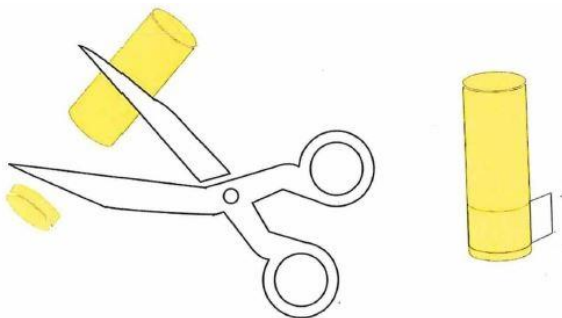

BELANGRIJK:

Probeer de Anti Choking Trainer eerst op uzelf uit om er zeker van te zijn dat deze goed werkt voordat u hem op een ander persoon gebruikt. Het zou geen kracht moeten vergen om te gebruiken. De luchtblaas moet zacht genoeg zijn zodat de juiste techniek een schuimprop gemakkelijk kan uitdrijven.

Het is belangrijk om niet te forceren: om verwondingen te voorkomen tijdens de training en bij het redden van een stikkend slachtoffer.

Stuur al uw vragen naar: info@actfastmed.com

Bel gratis: 855 934 9340

Voor garantie-informatie, ga naar: www.actfastmed.com/faq/