

Instructie hemiparese simulator



Instructie hemiparese simulator

De hemiparese simulator kan worden toegepast op zowel de linker- als de rechterzijde van het lichaam. De hemiparese simulator kan apart, of in combinatie met accessoires van het ouderdomssimulatiepak GERT gebruikt worden. Het aanbrengen van de diverse onderdelen kan het best gedaan worden door een tweede persoon. Bij gebruik van de overschoenen, deze als eerste aantrekken.

1. Gewichtsgordel voor de enkel



Wikkel strak rond de enkel. Het gewicht kan worden aangepast door er metalen staven uit te halen.

2. Kniespalk



Breng de spalk aan met de opening naar de voorkant en het kniegewricht op de juiste hoogte en sluit deze strak door middel van de klittenbandsluiting. Het aantrekken kan het best staand gedaan worden.

3. Oordopje



Het oordopje kan bij de testpersoon worden ingebracht. De oordopjes kunnen worden gebruikt in combinatie met de gehoorbeschermers van het ouderdom simulatiepak GERT.

Instructie hemiparese simulator

4. Ooglapje



Het ooglapje kan gedragen worden onder een bril en onder de bril van het ouderdomssimulatiepak GERT.

5. Lolli



Een lepel of iets vergelijkbaars kan worden gebruikt als vervanging.

6. Mitella



De band van de mitella kan in lengte worden aangepast.

7. Wandelstok



Stel de wandelstok af op de juiste lengte.

Instructie hemiparese simulator

Bij gebruik van de hemiparese simulator in combinatie met het ouderdoms-simulatiepak GERT, laat de componenten weg aan de kant van het lichaam waar de hemiparese moet worden nagebootst.



Instructie hemiparese simulator

Let op

Door het aantrekken van het hemiparese simulator, kunnen minder sterke personen, of personen met gezondheidsproblemen overmatig belast worden. Elke proefpersoon dient naar zijn gezondheidstoestand gevraagd te worden. Het hemiparese simulator mag alleen onder vakkundig toezicht gebruikt worden.

De gewichten moeten worden verminderd voor lichamelijk zwakke personen. De hemiparese simulator is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en oudere personen.

Reiniging

Alle onderdelen kunnen in de handwas, met lauwwarm water en een fijnwas-middel gewassen worden.

Voor het wassen van de kniespalk en de gewichtkordel dienen de gewichten te worden verwijderd.

Contact

Produkt + Projekt Wolfgang Moll
Andreasweg 7
89168 Niederstotzingen
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50

Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

info@produktundprojekt.de

www.produktundprojekt.de

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll

Algemene veiligheidsadviezen

De simulatie van beperkingen op grond van leeftijd, ziekte of handicap brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee, zoals een verhoogd risico op ongevallen.

De simulatie van beperkingen moet daarom altijd met bijzondere voorzichtigheid plaatsvinden.

Onze producten mogen niet worden gebruikt bij mensen

- met reeds bestaande beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd, ziekte of handicap
- met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen, epileptici, met een neurologische of psychische ziekte, met hartklachten of een verhoogd risico op een beroerte
- met acute ziekten zoals infecties en huidaandoeningen

Veel aandacht en voorzichtigheid zijn geboden bij kinderen en jongeren, maar ook bij mensen met cognitieve beperkingen of gedragsstoornissen.

Het gebruik van onze producten kan alleen in een veilige omgeving en alleen onder toezicht van een vakkundige persoon plaatsvinden.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het gebruik. Dit moet ervoor zorgen dat de bovenstaande punten in acht worden genomen.

Naast deze algemene veiligheidsadviezen moeten de veiligheidsadviezen in de respectievelijke instructies in acht worden genomen.

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll
