


Instructie rugpijnsimulator



Instructie rugpijnsimulator

Standaardconfiguratie

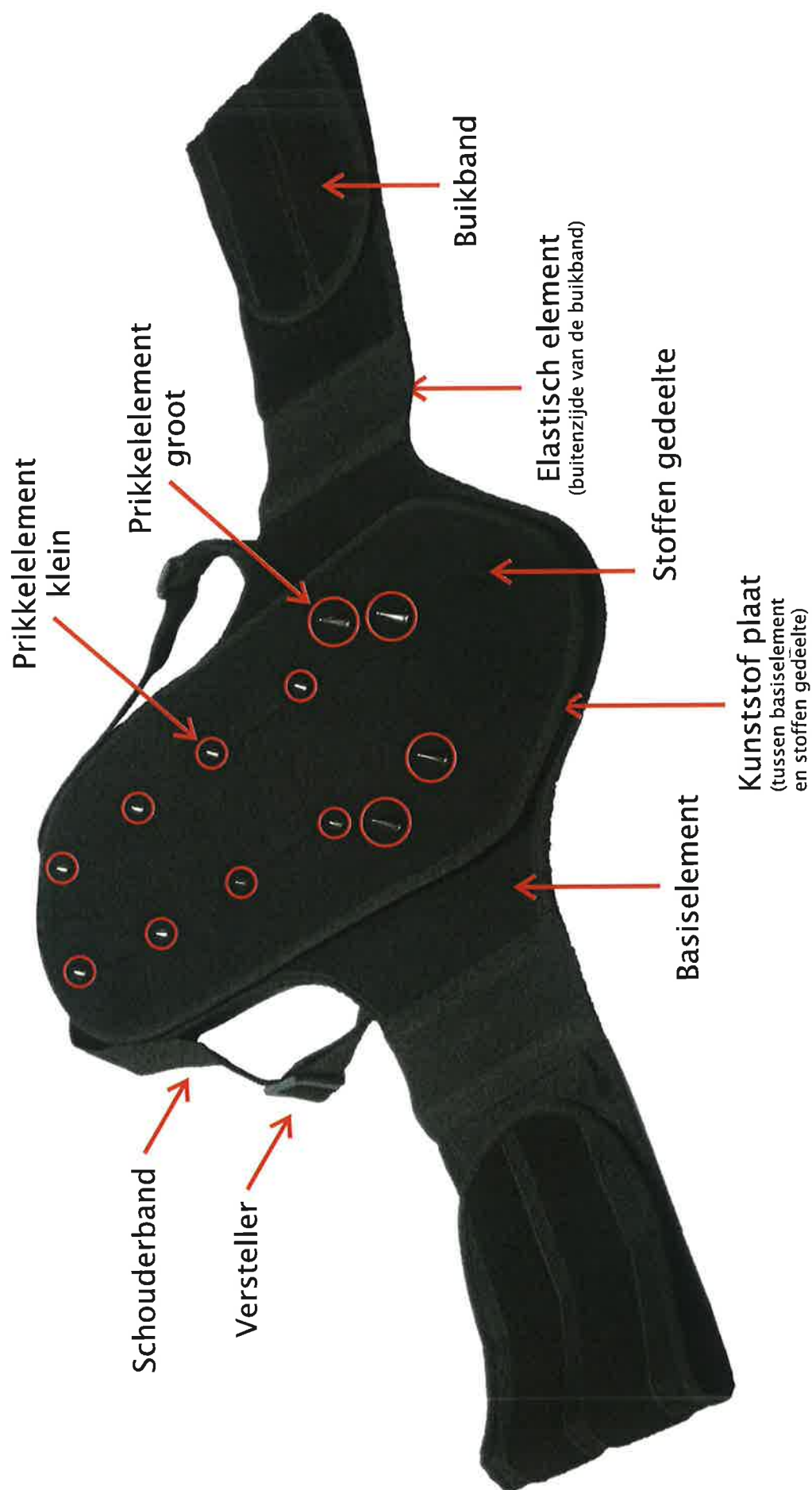

Instructie rugpijnsimulator

Set bestaat uit

Rugpijnsimulator klein voor lichaamslengte tot ca. 1,75 m
Rugpijnsimulator groot voor lichaamslengte vanaf ca. 1,75 m
Bewaartas
Reserve prikkelementen

Opbouw van de rugpijnsimulator

De rugpijnsimulator bestaat uit

1. een basiselement voor bevestiging aan het lichaam, dat ook de bewegingsvrijheid beperkt
2. een buigbare kunststof plaat om bewegingen te verzwaren en om druk te leggen op de prikkelementen
3. een stoffen gedeelte waarop de prikkelementen bevestigd worden

Het stoffen gedeelte wordt door middel van klittenband aan het basiselement vastgemaakt. De buigbare kunststof plaat wordt ertussen geklemd.

Algemene informatie

De prikkelementen dienen een oppervlakkige pijnprikkel te geven. Ze zijn zo ontworpen dat ze de huid en de kleding niet kunnen beschadigen. Toch wordt geadviseerd, om delicate stoffen zoals bijvoorbeeld zijde te beschermen, een t-shirt of iets dergelijks bij de hand te hebben, dat over de kleding en onder de rugpijnsimulator aangetrokken kan worden. Bovenkleding zoals jassen, colberts of dikke truien dienen te worden uitgetrokken.

Aantrekken van de rugpijnsimulator

1. Steek de armen door de schouderbanden zoals bij een rugzak. De prikkelementen moeten richting de rug van de persoon wijzen. De schouderbanden zijn elastisch maar kunnen door middel van de verstellers in lengte worden aangepast.
2. Sluit de buikband voor op het lichaam. Niet te strak. De buikband kan worden versteld met de zijdelingse elastische elementen. Maak ze los, trek ze naar voren en maak ze weer vast door middel van het klittenband. Maak ze na gebruik losjes vast voor de volgende gebruiker.

Instructie rugpijnsimulator

Aanpassen van de rugpijnsimulator

Door de modulaire opbouw biedt de rugpijnsimulator meerdere mogelijkheden.

Dit zijn de mogelijkheden:

1. U kunt alleen het basiselement gebruiken om alleen de maximale bewegingsruimte van het buigen en strekken van de rug te beperken.
2. U kunt het basiselement, samen met het stoffen gedeelte met de prikkelementen gebruiken en de buigbare kunststof plaat weglaten. Zoals beschreven bij punt 1 wordt dan alleen de maximale bewegingsruimte beperkt. In dat geval is ook de werking van de prikkelementen minder aanwezig, daar ze niet zo hard in de rug gedrukt worden.
3. U kunt de complete set gebruiken; het basiselement met het stoffen gedeelte en de kunststof plaat ertussen geklemd. De bewegingsruimte wordt dan erg beperkt. Daarnaast worden de prikkelementen harder in de rug gedrukt.

U kunt de prikkelementen verwijderen of verwisselen door ze los te schroeven. U kunt de prikkelementen handvast aandraaien. Reserve prikkelementen vindt u in een zakje in de tas.

De prikkelementen kan men nabestellen.

Veiligheidswaarschuwing

Het gebruik dient plaats te vinden onder toezicht van een expert. Er zijn geen beperkingen in gebruik bekend maar de expert dient wel te letten op eventuele beperkingen van de deelnemer (bv. zwangere vrouwen). Deelname dient altijd vrijwillig te zijn.

Contact

Produkt + Projekt Wolfgang Moll
Andreasweg 7
89168 Niederstotzingen
DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50

Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

info@produktundprojekt.de
www.produktundprojekt.de

Produkt + Projekt

Wolfgang Moll

Algemene veiligheidsadviezen

De simulatie van beperkingen op grond van leeftijd, ziekte of handicap brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee, zoals een verhoogd risico op ongevallen.

De simulatie van beperkingen moet daarom altijd met bijzondere voorzichtigheid plaatsvinden.

Onze producten mogen niet worden gebruikt bij mensen

- met reeds bestaande beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd, ziekte of handicap
- met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen, epileptici, met een neurologische of psychische ziekte, met hartklachten of een verhoogd risico op een beroerte
- met acute ziekten zoals infecties en huidaandoeningen

Veel aandacht en voorzichtigheid zijn geboden bij kinderen en jongeren, maar ook bij mensen met cognitieve beperkingen of gedragsstoornissen.

Het gebruik van onze producten kan alleen in een veilige omgeving en alleen onder toezicht van een vakkundige persoon plaatsvinden.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het gebruik. Dit moet ervoor zorgen dat de bovenstaande punten in acht worden genomen.

Naast deze algemene veiligheidsadviezen moeten de veiligheidsadviezen in de respectievelijke instructies in acht worden genomen.

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll
