

# Instructie tremor simulator

**Let u ook op de bijgevoegde instructies. Niet gebruiken bij personen met een pacemaker, hartproblemen, met epilepsie.**



## 1. Handschoen aantrekken aan beide handen



Twee paar handschoenen in twee maten worden geleverd. Kies de juiste maat. Indien nodig moet u de kabels met de drukknoppen overbrengen naar het paar in de andere maat. Trek de handschoen zo aan dat de handschoen met de zwarte boord bij rechtshandige personen rechts, en bij linkshandige personen links zit. Mocht het effect niet voldoende merkbaar zijn, dan kunt u vooraf de handen een beetje vochtig maken om het geleidingsvermogen te verbeteren.

## 2. Besturingseenheid inschakelen en de intensiteit langzaam verhogen


Het effect zal iets vertraagd merkbaar zijn. Zodra de handen trillen, de intensiteit niet meer verhogen. De handen moeten ontspannen zijn. De gebruiker kan het effect direct onderbreken door de handen tegen elkaar te houden.

U kunt kanaal 1 of kanaal 2 gebruiken. We leveren met de toewijzing van kanaal 2.

Om het kanaal te veranderen, steekt u de verbindingskabel in de overeenstemmende aansluiting.

Het kanaal dat niet in gebruik is, moet altijd worden uitgeschakeld.

Bedien altijd alleen de draaiknoppen aan de kant waar de verbindingskabel is ingestoken.

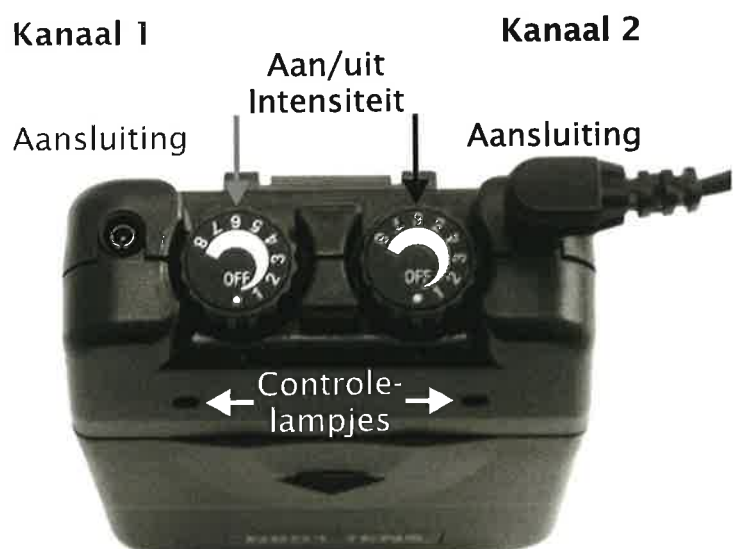

# Instructie tremor simulator

---

## Standaard instellingen

De besturingseenheid wordt voorinsteld geleverd. De bedieningsknoppen voor de instellingen bevinden zich onder de klep, die u naar beneden kunt trekken. Verander de standaardinstellingen eigenmachtig. Als u de instellingen wijzigt, vervalt elke aansprakelijkheid.

Pulsbreedte  
Standaardinstelling  
= 120  $\mu$ s



Modus  
Standaardinstelling  
= N

Pulsfrequentie  
Standaardinstelling  
= 10 Hz

## De batterij plaatsen en vervangen

Plaats voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt een 9 volt blokbatterij (niet meegeleverd) door de klep helemaal naar beneden te trekken. Let er bij het plaatsen van de batterij op dat de polariteit juist is. Een deel van de witte band moet onder de batterij zitten om deze later gemakkelijker te kunnen verwijderen. Vervang de batterij als het effect van de tremor simulator begint af te nemen.

# Instructie tremor simulator

---

## **Veiligheidstips voor gebruik**

Gebruik van scherpe, spitse of breekbare voorwerpen kunnen door het trillen tot een verhoogd ongevalsrisico leiden. Daarnaast kunnen metalen voorwerpen de stroom geleiden. Gebruik daarom alleen ongevaarlijke en niet metalen voorwerpen voor oefeningen met de tremor simulator.

Aanbevolen wordt bijvoorbeeld:

Bekers, borden en bestek van kunststof voor eetoefeningen

Stiften van kunststof of hout voor schrijfoefeningen

Let u er op dat voorwerpen makkelijk uit de hand kunnen glijden. Het is beter als de proefpersoon het apparaat niet zelf bedient, maar dat dit door een vakkundig persoon gedaan wordt. Die zal de proefpersoon moeten observeren en het apparaat voorzichtig moeten bedienen. Het is belangrijk om de stimulatiestroom voorzichtig op te hogen naar het gewenste niveau.

**Geen bediening van apparaten, in het bijzonder elektronische apparaten terwijl u deze handschoenen draagt!**

**Geen bediening van voertuigen of machines terwijl u deze handschoenen draagt!**

## **Was instructies voor de handschoen**

De handschoen mag in de handwas met een zacht wasmiddel gewassen worden.

**De elektroden voor het wassen verwijderen!**

De handschoenen zijn ook apart na te bestellen.

## **Contact**

Produkt + Projekt Wolfgang Moll

Andreasweg 7

89168 Niederstotzingen

DUITSLAND

Tel.: +49 (0)7325 - 18 0 81-50

Fax: +49 (0)7325 - 18 0 81-55

[info@produktundprojekt.de](mailto:info@produktundprojekt.de)

[www.produktundprojekt.de](http://www.produktundprojekt.de)

**Produkt + Projekt**



**Wolfgang Moll**